

CON LA
CAPACITACIÓN
PODEMOS AYUDARTE
CON NUESTROS
TALLERES DE RCP

Primer
trimestre
de 2025

Con
Mucho
Cuidado





DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Dispositivo portátil que puede salvar vidas
en casos de paro cardíaco súbito

Los DEA están disponibles en muchos lugares públicos como:

- ✓ Instalaciones deportivas
- ✓ Centros comerciales y supermercados
- ✓ Aeropuertos y estaciones de tren
- ✓ Edificios públicos, escuelas y universidades
- ✓ Hoteles, Oficinas y lugares de trabajo

Encuétranos >



www.conmuchocuidado.es

Actuar rápidamente y saber dónde encontrar un desfibrilador puede marcar una gran diferencia en una situación de emergencia.

Cómo usarlo de manera segura y efectiva:

1. Encender el DEA:

- Sigue las instrucciones de voz. Algunos DEA se encienden automáticamente al abrir la tapa.

2. Colocar los electrodos:

- Una debajo de la clavícula derecha y la otra en el lado izquierdo, debajo del pecho. Los electrodos deben estar bien adheridos a la piel.

3. Analizar el ritmo cardíaco:

- El DEA analizará el ritmo cardíaco de la persona y determinará si es necesaria una descarga. No toques a la persona durante este proceso.

4. Administrar la descarga:

- Asegúrate de que nadie esté tocando a la persona y presiona el botón de descarga. El DEA guiará el proceso con instrucciones de VOZ.

5. Continuar con la RCP:

- Sigue las instrucciones del DEA. Puede que te indique continuar con la reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que lleguen los servicios de emergencia.

6. Seguridad y capacitación:

- Aunque están diseñados para ser utilizados por personas sin formación médica, es recomendable recibir capacitación en RCP y uso de DEA para aumentar la confianza y eficacia en una emergencia.